

The Entire Body Care Program

AIR-IN SYSTEM

Système de livraison de solutions multifonctionnelles



Appareil d'absorption multifonctionnel pour tout le corps,

Le système Air-In réalise une absorption non invasive et indolore avec 2 applicateurs – haute pression
aiguille à air pour absorber les ingrédients actifs en profondeur dans la peau,
ultrasons denses et puissants pour activer les ingrédients.

POINT 01

Application
transdermique

POINT 02

Haute
Pression

POINT 03

Oxygénothérapie

POINT 04

Non Invasif

POINT 05

Sans
douleur

POINT 06

Solution pour
les peaux à
problème


Injections HA

L'aggravation du métabolisme cutané due à divers facteurs tels que le vieillissement cutané, les changements de température et la diminution de la fonction de sécrétion des glandes sébacées empêchent la peau de produire correctement le film de sébum naturel sur la couche cornée et provoquent un excès de cellules mortes et une peau sèche. La sécheresse n'est pas une sensation temporaire, elle rompt l'équilibre hydrique de la peau et provoque un vieillissement cutané global tel que des imperfections, des ridules et une perte d'élasticité. Les cosmétiques hydratants qui sont généralement appliqués uniquement sur la surface de la peau s'évaporent ou n'absorbent que la couche cornée et l'épiderme fin. D'autre part, les injections d'HA améliorent la peau et la rendent saine, belle et hydratante à l'intérieur en injectant l'acide hyaluronique « aimant d'humidité » dans la couche de derme.

Qu'est ce que les injections HA ?

L'injection d'HA est une méthode qui délivre directement de l'acide hyaluronique avec 200 à 300 fois plus d'eau dans le corps dans la couche dermique. Il s'agit d'un traitement anti-âge qui tire la peau et insère une multi-aiguille pour injecter de l'acide hyaluronique en profondeur directement dans la peau afin de la rendre hydratée et éclatante.

■ Principe

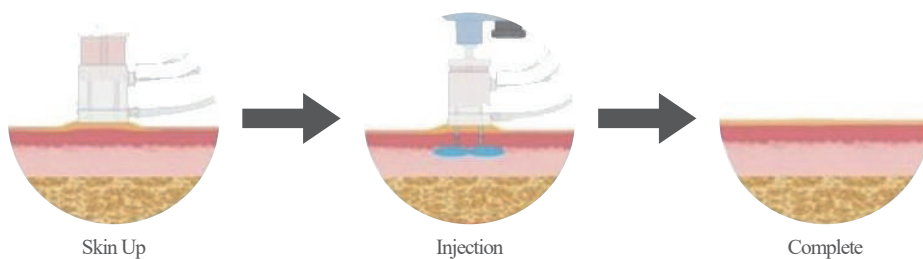

La pression des multi-aiguilles lifte le derme et injecte la solution dans le derme

■ Avantages et inconvénients

Avantages	Inconvénients
Injecte la solution avec une profondeur et une quantité régulières	Les résultats peuvent être différents selon la capacité et les compétences des médecins.
Ne gaspille pas la solution	Sensation douloureuse et contusions causées par l'aiguille (surtout sous les yeux)
Effet puissant en une seule injection	Il peut ne pas être efficace sur les peaux épaisses et grasses.
Peut être mélangé avec une solution éclaircissante ou du botox.	La rougeur dure 1 à 2 jours après l'injection.
Ne provoque pratiquement pas d'effets secondaires ou de sensations inconfortables	Une injection régulière de 3 à 4 mois est nécessaire pour conserver l'efficacité.

■ Changement sur le marché médical

Chirurgie plastique>> injections esthétiques>> soins esthétiques

Un nombre croissant de clients préfèrent les injections esthétiques à la chirurgie plastique en raison de la douleur et des longs temps d'arrêt, et préfèrent les soins de la peau sans aiguille et sans douleur par peur de la chirurgie, de la douleur et des blessures. Les médecins fournissent également des soins indolores et un traitement non invasif pour attirer des clients à long terme, comme un traitement de régénération après une chirurgie plastique et traitement au laser.

'Aiguille à Air' AIR-IN SYSTEM



■ Qu'est ce que AIR-IN SYSTEM?

Le système Air-In est un dispositif d'absorption multifonctionnel non invasif et indolore qui constitue une alternative aux injections. L'« aiguille à air » pneumatique donne la même sensation et la même efficacité que l'injection à l'aiguille. Composé de 2 applicateurs : un spray haute pression Air-In pour absorber les principes actifs en profondeur dans la peau et des ultrasons denses et puissants pour activer les principes actifs, le système Air-In est applicable sur l'ensemble du corps.


■ Caractéristiques

1. Pulvérisation haute pression de 5Bar
2. Système d'absorption transdermique par aiguille à air
3. Système sans contact, non invasif et indolore
4. Le soin complet du corps : de la tête aux pieds
5. Cartouche d'ampoule exclusive Air-In fabriquée selon la méthode brevetée PLGA pour ouvrir la barrière cutanée




■ Port A : de l'Air pour absorber les ingrédients actifs

Aiguille à air sans contact, non invasive et indolore
Ouvre la barrière cutanée et absorbe les principes actifs profondément dans la peau sans irritations
L'oxygène hautement concentré favorise la circulation cutanée et améliore la résilience de la peau.
4 programmes applicables selon les affections cutanées et zones d'application

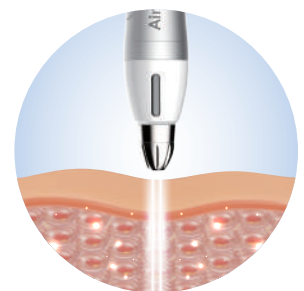



■ Port B : Des ultrasons pour activer les ingrédients actifs

Énergie ultrasonique Dense et puissante de 3MHz
Favorise l'activation des actifs et resserre la barrière cutanée
Niveau 1 à 5 d'intensité applicable selon les affections cutanées et les zones d'application
Normalise le cycle de vie des cellules de la peau

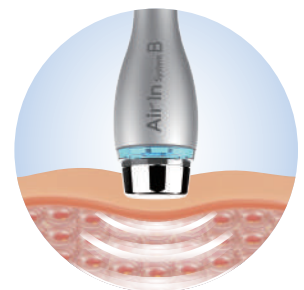



'Aiguille à Air' AIR-IN SYSTEM

Test d'absorption en fonction de la profondeur de pénétration du système Air-In

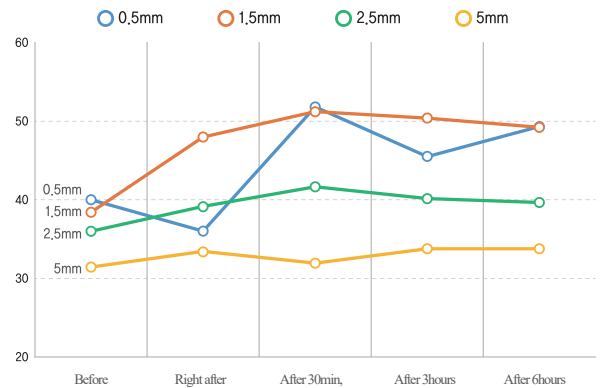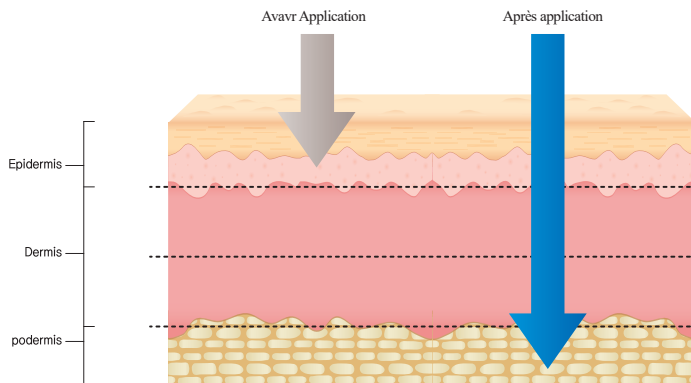

Une fois que les ingrédients actifs traversent la barrière cutanée, la teneur en humidité a augmenté le plus dans la profondeur de 1 à 2 mm, là où se trouve le derme. Au fil du temps, l'épiderme et le derme restent hydratés.

Comparaison de l'absorption par la main/l'aiguille/le système Air-In

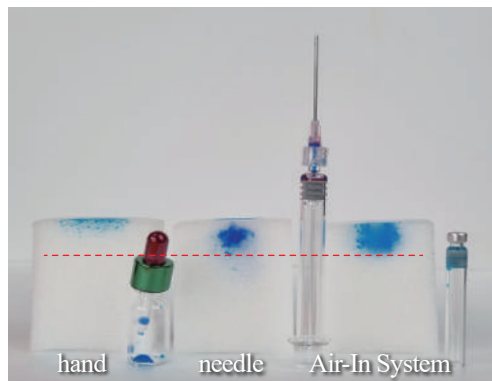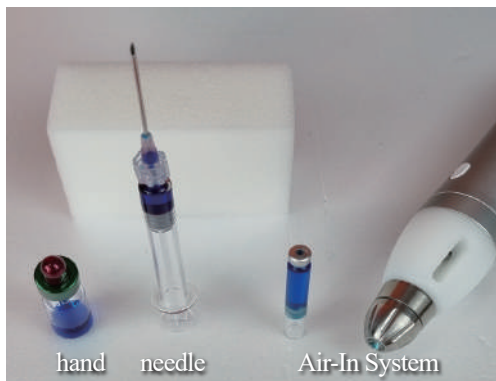

Profondeur d'absorption similaire entre l'aiguille et le système Air-In

Le domaine d'application du système Air-In est plus large et plus uniforme.

Targets

- Les personnes qui ne veulent pas de traitement douloureux
- Les personnes qui ne veulent pas de lifting par fil tenseur
- Les personnes qui ne veulent pas être en arrêt de travail
- Personnes ayant la peau sèche
- Les personnes qui ont la phobie des aiguilles
- Peaux sensibles dû à des traitements laser
- Personnes à la barrière cutanée endommagée

Zones d'application

Corps entier- tête, visage, corps

Peaux endommagées

Acnés, rides,
peau à résilience réduite

Peau fine

Rougeur du visage, télanctasie,
atopie, psoriasis, peau sensible

Pigmentation

Aisselles, zone Y, etc.

Cuir Chevelu

Nettoie le cuir chevelu et les pores,
régénération du cuir chevelu

Visage

Visage entier
Yeux, cou, même à l'arrière des oreilles

Corps

Le corps entier
Facile à cibler des pièces spécifiques

LES AMPOULES AIR-IN

■ La cause des problèmes de peau : Trouble de la communication cellule à cellule

1. Qu'est-ce que la communication cellulaire ?

La communication cellulaire est une communication entre les cellules présentes dans toutes les activités cellulaires, qui constitue un mécanisme clé qui génère diverses réponses énergétiques et métabolismes nécessaires au maintien de la vie. Les signaux entre eux sont impliqués dans tous les processus de vieillissement cellulaire, de la naissance à la mort de la cellule.


2. Méthode de communication cellulaire

Les récepteurs acceptent et reconnaissent les signaux via les matériaux de signalisation.

Les matériaux de signalisation comprennent des hormones, des ions et des cytokines, et les récepteurs reconnaissent et combinent les matériaux en fonction de chaque caractéristique.

3. Trouble de la communication de cellule à cellule

L'environnement externe comme la lumière bleue, les rayons UV, la pollution, le stress provoque des déséquilibres internes comme le vieillissement cutané, brise le mécanisme de l'homéostasie cellulaire, entraîne des dommages à l'ADN. Par conséquent, l'information génétique correspondante est modifiée, provoquant des problèmes dans la production et le fonctionne-

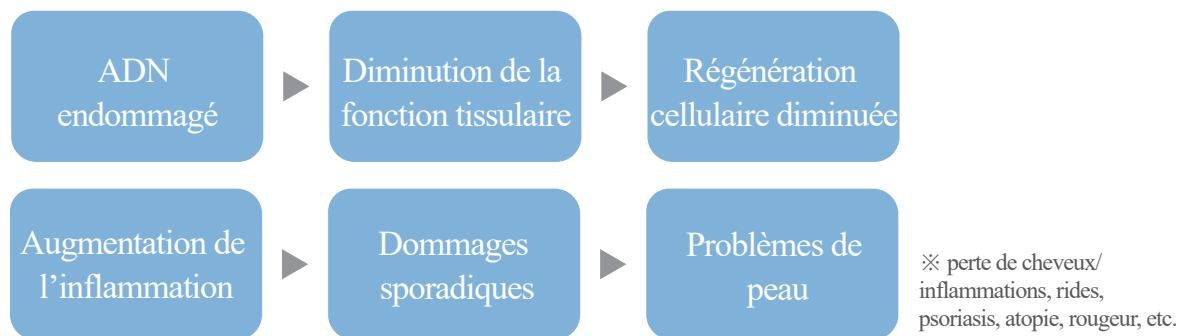

Technologie de base

'PLGA' Pénétration rapide des principes actifs

- La technologie PLGA délivre intensément les principes actifs étape par étape et augmente le taux d'absorption et la persistance des principes actifs.
- La double encapsulation améliore la stabilité et protège les actifs du pH, de la température et du temps.

PLGA method



Ingrédient Clé

NAD+, l'ingrédient de signalisation de cellule à cellule

Nicotinamide adénine dinucléotide)

L'ingrédient de signalisation de cellule à cellule résolvant les causes sous-jacentes du vieillissement cutané, étant composé de vitamine B3 (niacine) et d'acide nucléique.

Distribué dans toutes les cellules du corps

L'augmentation du NAD+ est la clé du traitement anti-âge.



AIR - IN REPAIR AMPOULE

Anti-âge (Soin anti-âge intensif)

Air-In Repair Ampoule



Résoudre les causes sous-jacentes du vieillissement cutané

- Amélioration immédiate de la résilience de la peau
- Mode d'emploi : connectez l'ampoule au système Air-In à appliquer. · Ingrédients principaux : NAD⁺, Sérécine, Fibroïne
- Contenance : 1,5 ml*8e

Caractéristiques

1. améliore la peau à problèmes causé par des dommages cutanés accélérés
2. L'ingrédient de signalisation de cellule à cellule NAD⁺, la protéine naturelle de sérécine et la fibroïne accélèrent la régénération de la peau en favorisant la multiplication cellulaire, la production rapide et la synthèse de fibres élastiques et conjonctives.
3. Resserre la barrière cutanée
4. Améliore l'éclat et de la résilience de la peau
5. Caractéristiques des ingrédients :

La fibroïne pour restaurer le derme endommagé

- Stable contre l'action de l'enzyme protéolytique

- Améliore le pouvoir régénérant de la peau pour cicatrifier les plaies et rendre la peau saine

Sérécine pour resserrer la barrière cutanée

- L'ingrédient le plus proche de la composition de la peau

- Resserre la barrière cutanée et hydrate en profondeur dans la peau

NAD⁺ ingrédient de signalisation cellulaire

- Restaure la résilience cutanée déclinée

■ Résultats Cliniques



Titre du test : Évaluation de l'ampoule THESERA Air-In Repair concernant l'amélioration de la résilience cutanée

Matériel de test : Ampoule de réparation THESERA Air-In


Agence de test : KCAC Korea Institute of Dermatological Science

Sujet de test : Plus de 20 femmes âgées entre 30 et 55 ans

Période de test : 21 juillet 2021 ~ 22 juillet 2021


Application : Après avoir lavé le visage avec le même nettoyant, faire une pause de 30 min. et mesurer avant et après l'application de l'ampoule.

Amélioration de l'élasticité de la peau

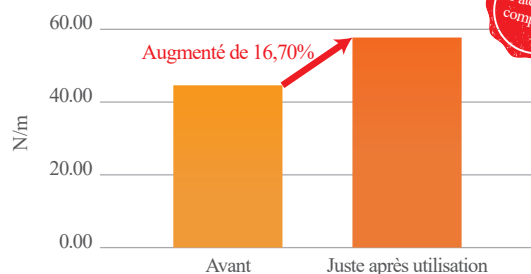

► amélioration immédiate de l'élasticité de la peau : Augmentation de 16,70%

Évaluation de la satisfaction concernant l'amélioration de l'élasticité

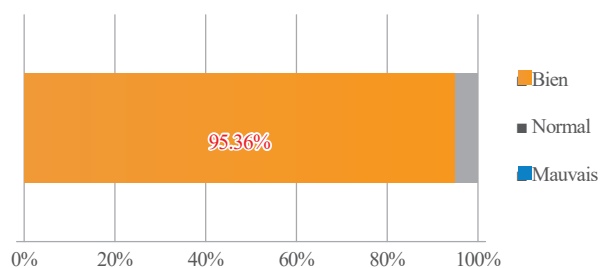

► 95,36% de satisfaction pour l'amélioration de l'élasticité de la peau

■ Conclusion : THESERA Air-In Ampoule améliore immédiatement l'élasticité de la peau après une seule utilisation.
※ Le test de non-irritation cutanée terminé

AIR - IN AC AMPOULE

ISBM (Integrated Skin Bacteria Management)

Air-In AC Ampoule



- Résoudre les causes sous-jacentes de l'acné · Empêcher la récurrence de l'acné
- Mode d'emploi : connectez l'ampoule au système Air-In à appliquer. · Ingrédients principaux : NAD⁺, Magnésium, Acide salicylique
- Contenance : 1,5 ml*8e

Caractéristiques

1. Améliore les troubles cutanés causés par un déséquilibre hormonal dû à un dysfonctionnement métabolique
 2. L'ingrédient de signalisation de cellule à cellule NAD⁺, le magnésium et l'acide salicylique bloquent la cause sous-jacente de la peau sujette à l'acné en normalisant la fonction métabolique de la peau
 3. Contrôle l'excès de sébum
 4. Désinfecte et soulage les troubles inflammatoires et l'acné récurrente
 5. Caractéristiques des ingrédients Magnésium pour l'équilibre hormonal
 - Empêche la production excessive d'hormones et de sébum due au stress et au déséquilibre hormonal
 - Protège la peau fragilisée des irritations
 - améliore la barrière cutanée endommagée
- Acide salicylique pour le soulagement de l'acné/effet antibactérien
- améliore l'acné rouge ou enflée en éliminant les bactéries responsables de l'acné
 - Aide à la croissance de nouvelles cellules en déchargeant les cellules épidermiques âgées et le sébum dans les pores
- NAD⁺ : ingrédient de signalisation de cellule à cellule
- Bloque la cause sous-jacente de l'acné telle que l'hormone mâle, le

■ Résultats Cliniques



Titre du test : Évaluation de l'adéquation de l'ampoule THESERA Air-In AC sur les peaux acnéiques

Matériel de test : Ampoule THESERA Air-In AC


Agence de test : KCAC Korea Institute of Dermatological Science

Sujet de test : Plus de 20 adultes âgés entre 20 et 40 ans


Période de test : 15 juillet 2021 ~ 17 août 2021 (4 semaines)

Application : Appliquer l'ampoule deux fois par jour après avoir lavé le visage à l'étape ampoule.


La proportion de lésions non inflammatoires

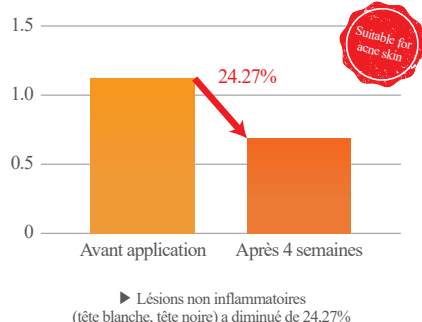

Satisfaction pour l'amélioration de l'élasticité

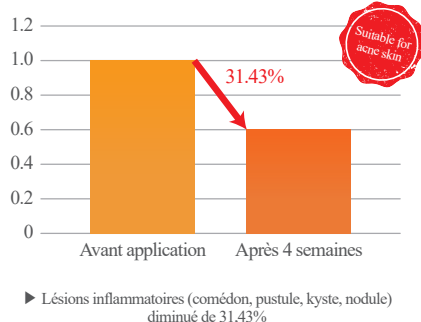

Degré d'amélioration de la peau inflammatoire

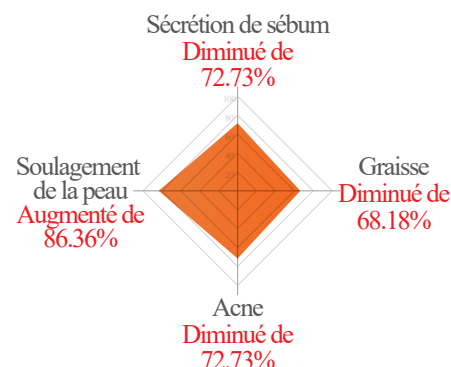

■ Conclusion : THESERA Air-In AC Ampoule est un produit adapté aux peaux acnéiques.

※ Le test de non-irritation cutanée a été validé

AIR - IN CERATOIN AMPOULE

Soin Rééquilibrateur de la Barrière Cutanée

Air-In Ceratoin Ampoule



Résout la cause fondamentale de la sécheresse cutanée
Renforce la barrière cutanée et offre 72 heures
rétention d'humidité


Mode d'emploi : Connectez l'ampoule au système Air-In pour
appliquer.

Ingrédients principaux : NAD+, Céراتoine, Sodium PCA
Volume : 1,4 ml * 8 unités

Caractéristiques

1. Résout la cause profonde de la déshydratation cutanée en rééquilibrant la barrière cutanée, en prévenant la déshydratation et en retenant l'eau dans la peau pour augmenter son pouvoir de rétention.
2. NAD+ (ingrédient de signalisation de cellule à cellule) et Ceratoin équilibrent entre les cellules de la couche cornée et les lipides intercellulaires, renforcent la barrière cutanée et résolvent la cause fondamentale de la sécheresse cutanée.
3. Renforce la barrière cutanée, améliore la sécheresse cutanée, maintient l'hydratation de la peau et améliore la texture de la peau
4. Caractéristiques des ingrédients
 - > Céramide-Liposome 20% : Aimant d'humidité
 - Un ingrédient naturel qui forme une barrière contre l'humidité en se liant aux molécules d'eau environnantes et en se liant aux cellules de la couche cornée pour prévenir la perte d'hydratation, aidant à stabiliser la barrière cutanée et à hydrater la peau.
 - > Sodium PCA : Maintien de l'humidité
 - L'un des facteurs naturels d'hydratation, il absorbe l'humidité de l'air et le fixe dans la peau pour éviter le dessèchement cutané.
 - > NAD+ : Ingrédient de signalisation cellule à cellule
 - Active la transférase qui favorise la synthèse des céramides, renforçant la barrière cutanée

■ Résultats Cliniques

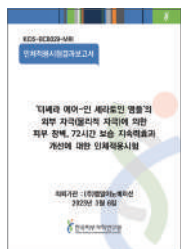

Titre du test : Évaluation de l'amélioration de THESERA Ceratoin Ampoule concernant la barrière cutanée par des stimuli externes (stimuli physiques) et effet hydratant 72 heures

Matériel de test : THESERA Ceratoin Ampoule


Agence de test : KCAC Korea Institute of Dermatological Science

Sujet de test : Plus de 20 adultes âgés entre 20 et 65 ans

Période de test : 13 février 2023 ~ 6 mars 2023 (4 semaines)


Application : Appliquer une quantité égale sur l'avant-bras gauche.

Amélioration de la perte d'eau transépidermique

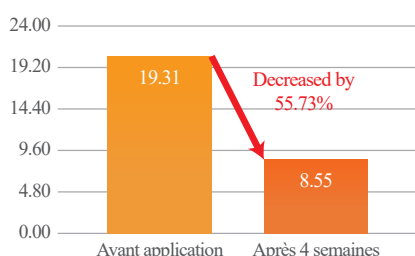


► La perte d'eau transépidermique a diminué de 55,73 %

Amélioration des niveaux d'hydratation de la peau

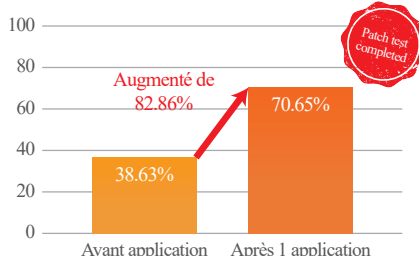

► Les niveaux d'hydratation immédiate de la peau ont augmenté de 82,86 %

Rétention d'humidité pendant 72 heures

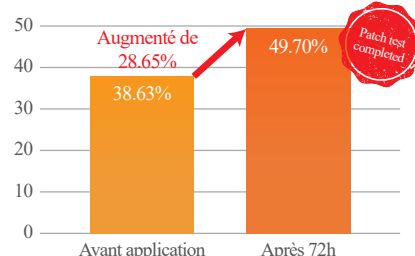

► La rétention d'humidité après 72 heures a augmenté de 28,65 %

■ Conclusion : THESERA Air-In Ceratoin Ampoule est un produit adapté pour améliorer la barrière cutanée et avoir un effet hydratant pendant 72 heures.

※ Le test de non-irritation cutanée a été validé

AIR - IN TONING AMPOULE

Air Toning Treatment

Air-In Toning Ampoule



- Résout la cause fondamentale de la pigmentation de la peau
- Améliore les taches de rousseur et l'hyperpigmentation
- Mode d'emploi :
Connectez l'ampoule au système Air-In pour appliquer.
- Ingrédients principaux :
NAD+, Acide Tranexamique, Niacinamide, Bisabolol,
- Acide Mandélique
Volume : 1,4 ml * 8 unités


■ Caractéristiques

1. Une ampoule pour les pigmentations aggravées et récurrentes qui gère à la fois la mélanine superficielle et profonde.
2. NAD+ (ingrédient de signalisation de cellule à cellule) et l'acide tranexamique agissent contre l'activité de la mélanine cutanée pour restaurer une peau claire et propre.
3. Améliore le teint terne et le teint de la peau, atténue la pigmentation et agit contre l'activation de la mélanine.
4. Caractéristiques des ingrédients
 - > Acide Tranexamique : Bloque l'infiltration de mélanine
 - Bloque et empêche les pigments de mélanine de pénétrer profondément dans le derme en raison de dommages à la couche basale.
 - > Niacinamide : Supprime la diffusion de la mélanine
 - Supprime le mouvement du pigment mélanique, réduit les dépôts dans l'épiderme et aide à éclaircir la peau.
 - > Bisabolol : Inhibe la production de mélanine
 - Apaise rapidement la peau exposée aux UV et rougie, inhibe la synthèse de mélanine et éclaircit le teint.
 - > NAD+ : Ingrédient de signalisation de cellule à cellule
 - Aide à éclaircir la peau en inhibant le mouvement des mélanosomes des cellules de mélanine vers les kératinocytes.

■ Résultats Cliniques

Titre du test : Évaluation de l'ampoule tonique THESERA Air-In concernant l'atténuation du mélasma et de l'hyperpigmentation
Matériel de test : Ampoule Tonifiante THESERA Air-In
Agence de test : KCAC Korea Institute of Dermatological Science
Sujet de test : 20 adultes âgés de 40 à 63 ans
Période de test : 13 février 2023 ~ 13 mars 2023 (4 semaines)
Application : Appliquer deux fois par jour après le nettoyage, matin et soir, au pas de l'ampoule.

Taux d'amélioration des taches de rousseur et de la pigmentation

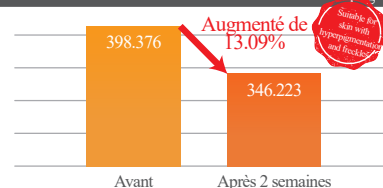

Les taches de rousseur et l'hyperpigmentation se sont améliorées de 13,09 %

■ Conclusion : THESERA Air-In Toning Ampoule est un produit adapté pour améliorer les taches de rousseur et l'hyperpigmentation.

■ Résultats Cliniques

Titre du test : Évaluation des stimuli cutanés primaires provoqués par l'ampoule tonique THESERA Air-In
Matériel de test : Ampoule Tonifiante THESERA Air-In
Agence de test : Institut coréen des sciences dermatologiques KCAC
Sujet de test : 35 adultes âgés de 24 à 65 ans
Période de test : 20 février 2023 ~ 23 février 2023
Application : Appliquer l'ampoule et observer le degré d'irritation après 30 minutes, 24 heures et 48 heures.

Résultats des tests de réaction cutanée

No. of material	Test material	The Number of irritation	Skin reaction			Average skin reaction
			30 min.	24 hr.	48 hr.	
#1	Air-In Toning Ampoule	0	0.0	0.0	0.0	0.00

Réactions allergiques cutanées






Allergic reactions	30 min.	24 hr.	48 hr.
1. Redness	0	0	0
2. Swollen	0	0	0
3. Flaky skin	0	0	0
4. Itchiness	0	0	0
5. Pain	0	0	0
6. Burning sensation	0	0	0
7. Stiffness	0	0	0
8. Tingling	0	0	0

■ Conclusion : Sur la base des résultats des tests d'application humaine pour l'irritation cutanée primaire, il a été déterminé que l'ampoule tonique THESERA appartient au groupe de produits à faible irritation car elle n'a montré aucune irritation.





※ Le test cutané hypoallergénique terminé

AIR - IN Protocole

■ 8 séances par coffret / Durée d'une séance: 50 min.

Etapes	Produit	Durée	Instructions
Nettoyer	 <p>Repose Balance Milk Cleanser (500ml)</p>	5 min.	<p>1. Après avoir pris la bonne quantité dans un bol en verre, appliquez-la sur tout le visage et massez. doucelement pour éliminer le maquillage, la saleté et autres impuretés.</p>
Equilibrer le PH	 <p>Hydroglow Cell Ampoule (200ml)</p>	2 min.	<p>1. Vaporisez la bonne quantité sur un coton et essuyez doucement le grain de peau. ► Utilisations multiples 1) Toner : Vaporisez la bonne quantité sur un coton et essuyez délicatement en fonction du grain de peau. 2) Ampoule : Hydrate et nourrit la peau sèche dès l'étape de l'ampoule. 3) Brume : Vaporisez chaque fois que nécessaire pour garder la peau hydratée.</p>
1er Masque	 <p>Repose Balance Toning Mask (200ml)</p>	15 min.	<p>1. Après avoir pris la bonne quantité dans un récipient en verre, appliquez sur tout le visage et laisser poser pendant 10-15 minutes. ► Appliquer en couche épaisse sur le front, le nez et entre les sourcils là où il y a beaucoup de sébum 2. Frottez doucement avec de l'eau et essuyez avec une éponge.</p>
Aiguille à Air	 <p>Air-In A port + Air-In Repair Ampoule or AC Ampoule or CeratoIn Ampoule or Toning Ampoule (1.4ml*8ea)</p>	5 min.	<p>1. Choisissez l'ampoule adaptée au type de peau et appliquez-la sur la peau après l'avoir combinée avec Air-In System. *Configuration du port A (faisceau d'air haute pression) 1) Allumez l'interrupteur et appuyez sur le bouton d'alimentation. Vérifiez que le piston du port A est bien réinitialisée. 2) Retirez la tête du port A et connectez l'ampoule à l'intérieur de la tête. 3) Connectez la tête au port A. (Vérifiez le site de combinaison et fixez la tête en tournant vers la gauche, tout en vous assurant que la tête est tournée vers le bas.) 2) (Sur le moniteur) Choisissez un port, un programme et un niveau, réglez la durée(par défaut 5 min.) et appliquer sur la peau. *Comment configurer le port Air-In System A 1) Zones larges (front/joues/cou) : CO, P1 2) Zones étroites (Autour des yeux/nez/philtrum) : P2 3) Zones nécessitant des soins intensifs : P3</p>
Ultrasons	 <p>Air-In B port + Repose Balance Gel (500ml)</p>	10 min.	<p>1. Appliquez la bonne quantité de Repose Balance Gel sur le visage. 2. Sélectionnez le port B sur l'écran. 3. Réglez le programme, le niveau et la durée de fonctionnement (par défaut 10 min.) en fonction du problèmes de peau et appuyer sur START. *Programme recommandé pour le programme facial Air-In 1) Sensible/éclaircissant : P1, niveau 1, 2 2) Sec/rides : P2, Niveau 3, 4 3) Elasticité/levage : P3, Niveau 5</p>

AIR - IN Protocole

Etapz	Produit	Durée	Instructions
Bloquer les ingrédients actifs	 Glow Highlighting Mask (25g*10ea)t	20 min.	1. Il donne de l'éclat à la peau en absorbant et en protégeant les principes actifs. *Comment utiliser le masque illuminant Glow 1) Fixez le masque le long de la ligne du visage, en commençant par le front, les joues et le menton. 2) Après avoir retiré le film, fixez fermement la feuille sur le visage à l'aide d'un pinceau en silicone le long de la ligne du visage.
Soins à la maison	 7.2 Revital Cell Ampoule (50ml) + Hydroglow Cell Cream (100ml) + Perfect Sun Screen (50ml)	3 min.	1. Après un soin Repair ou Ceratoin ► Appliquez l'ampoule 7.2 Revital Cell qui améliore l'élasticité et la régénération de la peau en renforçant la barrière cutanée avec 7 ingrédients actifs, et la crème cellulaire Hydroglow qui prévient la perte d'hydratation en équilibrant l'hydratation à l'intérieur et à l'extérieur de la peau afin que les ingrédients actifs puissent rester longtemps. Terminez ensuite avec Perfect Sun Screen.
	 Cica Clearing Ampoule (30ml) + Cica Clearing Cream (20ml) + Perfect Sun Screen (50ml)		1. Après un soin AC ► Appliquez l'ampoule et la crème Cica Clearing, qui éliminent la cause des problèmes de peau et renforcent la barrière cutanée, anti-inflammatoires et régénératrices en contrôlant l'excès de sébum et l'équilibre huile-hydratation. Terminez ensuite avec Perfect Sun Screen qui protège la peau de la lumière bleue et des rayons ultraviolets bloquant la principale cause des problèmes de peau.
	 Mela Touch On Ampoule (50ml) + Mela Touch On Cream (20ml) + Perfect Sun Screen (50ml)		1. Après un soin Toning ► L'ampoule et la crème Mela Touch On soulagent l'hyperpigmentation et améliorent le teint en bloquant la lumière et la chaleur au quotidien, et Perfect Sun Screen protège la peau de la lumière bleue et des rayons ultraviolets bloquant la principale cause des problèmes de peau.

AIR – IN Technique

Port A aiguille à air

•Objectif

Absorber les principes actifs et fournir de l'oxygène pour favoriser la circulation sanguine et lymphatique

•Effets attendus

Fournit un stimulus avantageux aux cellules dermiques

1. Redonne de l'éclat à la peau

2. Nettoie la peau


• Mode d'emploi : Déplacez lentement l'applicateur en gardant la distance entre le lem et la peau à angle droit.

► Appliquer en même temps que le grain de peau.

► De l'intérieur vers l'extérieur

► Réglez le programme et le niveau selon la zone d'application et le problème cutané visé.

► Faites attention au sens de l'applicateur et évitez air soufflé dans le nez.

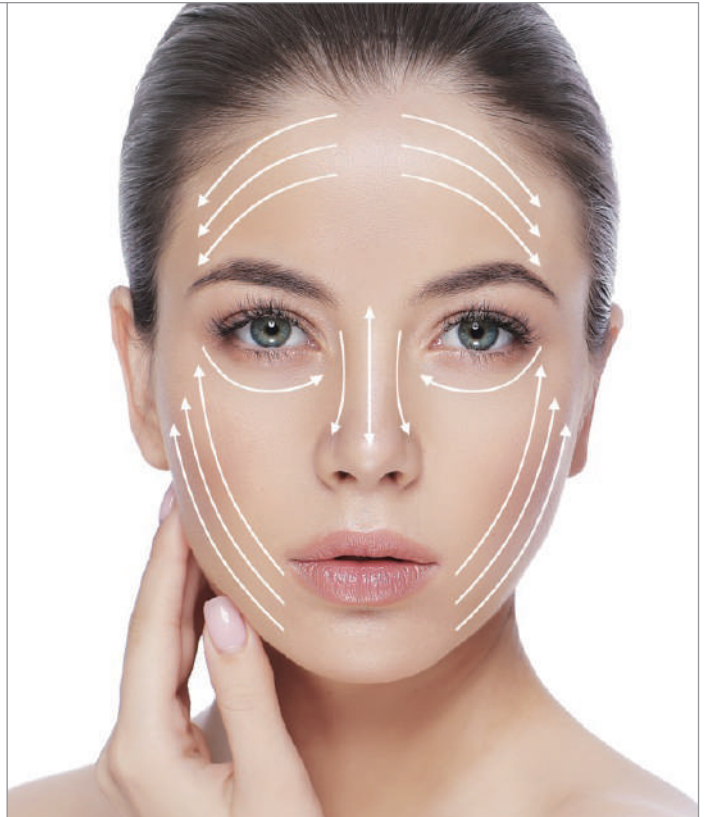

Port B ultrasons

•Objectif

Activer les principes actifs et le mouvement cellulaire

•Effets attendus

1. Active les ingrédients actifs absorbés par l'aiguille à air

2. Fournit une énergie de vibration élevée et dense aux cellules âgées


3. Resserre la barrière cutanée en induisant l'activation des cellules de la peau

• Mode d'emploi : placez l'applicateur étroitement sur la peau et déplacez-le lentement

Appliquez Repose Balance Gel pour fournir l'énergie de vibration efficacement

► Appliquer en suivant la direction musculaire.

► Réglez le programme et le niveau selon la zone d'application et le problème cutané visé.

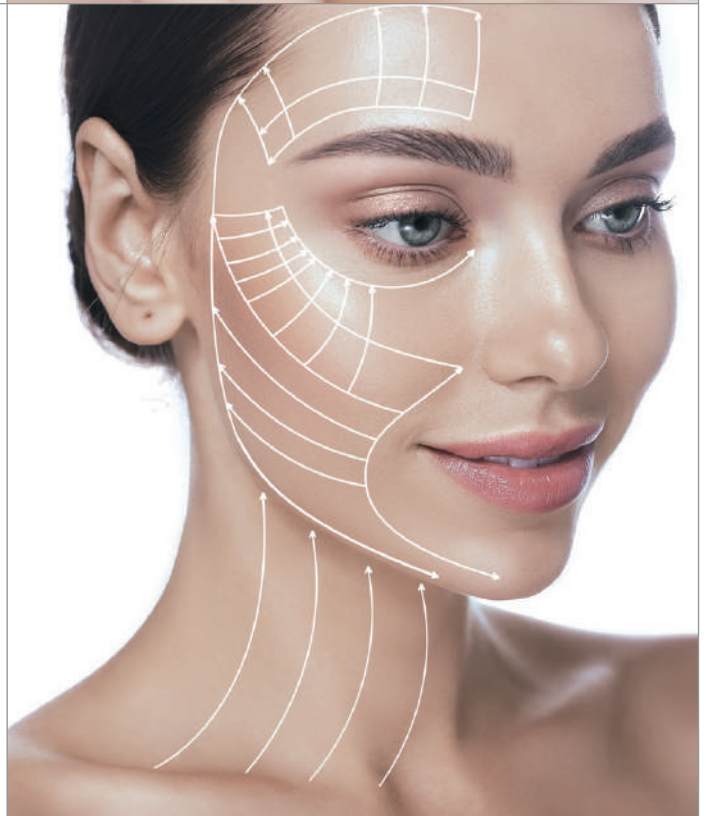

* Veuillez vous référer à la chaîne YouTube (@THESERA OFFICIAL) pour les techniques détaillées.

AIR - IN Précautions

Dispositif d'absorption non invasif et indolore THESERA Air-In System s'applique à la peau de tout le corps. Il est idéal pour améliorer tous les problèmes de peau sans effets secondaires, douleurs et temps d'arrêt. Veuillez lire attentivement les instructions pour augmenter son effet.

■ Précautions avant le soin

1. Partagez toutes les informations sur le traitement Air-In avec votre client.

■ Précautions pendant le soin

1. Évitez l'étape « nettoyage en profondeur à l'air » pour les peaux sensibles et sèches.
2. Le port A peut perturber la respiration. Il faut prévenir le client avant de l'appliquer sur cette zone
3. Les zones cutanées fines peuvent être irritées par la haute pression.
4. Sélectionnez le programme, le niveau et la durée appropriés en fonction des types de peau et des zones d'application..

■ Précautions après le soin

1. Évitez les rayons UV, l'alcool, le sauna et l'exercice excessif le jour du traitement.
2. Une crème solaire est nécessaire après le traitement.
3. Utilisez des produits de soins à domicile adaptés pour conserver plus longtemps les actifs dans la peau.

■ Cibles

1. Les qui ne veulent pas faire des soins douloureux
2. Les personnes qui ont peur des techniques de lifting par laser ou par fils tenseurs
3. Peaux sensibles suite à la réalisation de soins fréquent au laser
4. Les personnes qui ne veulent faire des soins qui ne nécessitent pas d'arrêt de travail
5. Barrière cutanée brisée
6. Les personnes qui ont la peau sèche